

Snabbguide

1. Starta enheten

För att starta enheten, håll in knappen 2 sekunder.



2. Bild guide

1. För att ta en bild, tryck en gång på mitten knappen.
2. För att spara bilden håll ned mitten knappen tills "sparar fil" kommer upp.
3. Tryck en gång till för att ta en ny bild.

Kontrollera så att symbolen visas upp till vänster.



3. Video guide

1. För att ta ett filmklipp, håll ner mitten knappen till den röda lampan längst upp åt vänster på skärmen börjar blinka rött.
2. Tryck en gång till på mitten knappen för att avsluta inspelningen.
3. Tryck på höger knappen för att se den senast inspelningen. Det går också att hitta alla inspelade filmer i meny. Klicka på vänsterknappen för att navigera till meny.



Kontrollera så att symbolen visas upp till höger.

4. Rengöring

Rengör alltid instrumentet och dess tillbehör efter användning. Desinficera därefter i UV-skåp eller med etanolbaserad ytdesinfektion.

Support

+46 8 502 462 80
information@gedoc.se

 **GEDOC**
INNOVATIVE DIAGNOSTIC

