

# **BESDATA**

Bruksanvisning  
**Digitalt Multi-Instrument**

Tack för att du har valt BESDATA® Instrument. Bruks- och underhållsanvisningarna i denna manual ska följas för att säkerställa produktens tillförlitlighet. Läs manualen noggrant innan du använder produkten.

Om du stöter på ett tekniskt problem relaterat till användningen av BESDATA® Instrument, vänligen kontakta din distributör för support efter köp.



**Tillverkaren försäkrar på eget ansvar att  
produkten överensstämmer med de  
väsentliga kraven i MDR 2017/745**

**Upphovsrätt tillhör SHENZHEN BESDATA TECHNOLOGY CO., LTD..**

Kopiering eller återgivning av någon del av denna manual på något sätt utan skriftligt tillstånd från **SHENZHEN BESDATA TECHNOLOGY CO., LTD.** är strikt förbjudet.

Tryckt i Kina.

## Om denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning beskriver produktens användningsområden, funktioner och hantering. Innan produkten används ska innehållet i denna manual noggrant läsas och förstås.

Denna bruksanvisning beskriver produkten och dess tillbehör. Vänligen kontakta distributören vid eventuella frågor.

Förvara denna bruksanvisning i närheten av produkten så att den enkelt och snabbt kan konsulteras vid behov.

Alla illustrationer i denna manual är endast avsedda som referens.

## Produktinformation

- **Produktnamn:** Digitalt Multi-instrument
- **Produktmodell:** VOT-01, VOT-02
- **Datum:** Se UDI och märkning
- **Teknisk livslängd:** 5 år

## Versionsinformation

Versionsnumret för denna manual kan komma att ändras på grund av programvara eller tekniska specifikationer utan föregående meddelande. Versionsinformationen för denna manual är följande:

- **Dokumentnummer:** BESDATA-QR-4.2.3-02-07-BD011-02
- **Versionsnummer:** A / 1
- **Utgivningsdatum:** 2026.03.10

## Uttalande

Tillverkaren har upphovsrätten till denna ej offentligt publicerade manual och har rätt att behandla den som konfidentiell information. Denna manual får endast användas som referensmaterial för drift, underhåll och reparation av produkten, och ingen annan har rätt att vidarebefordra denna manual till tredje part.

Produktmanualen innehåller företagshemlig information som skyddas av upphovsrättslagen, och ingen del av denna manual får kopieras, mångfaldigas eller översättas till annat språk utan tillverkarens skriftliga medgivande. Innehållet i denna produktmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## **Tillverkarens ansvar**

Tillverkaren ansvarar för produktens säkerhet, tillförlitlighet och prestanda under följande förutsättningar:

- Förvaringsmiljö, arbetsmiljö och elektrisk miljö uppfyller produktspecifikationerna.
- Produkten används i enlighet med manualen.
- Produkten används inom angiven Teknisk livslängd.

## Innehåll

1. Introduktion.....	6
1.1. Produktöversikt .....	6
1.2. Avsedd användning.....	6
1.3. Produktritning.....	7
1.4. Försiktighetsåtgärder och varningar .....	9
2. Användning.....	10
2.1. Installera instrumentet .....	10
2.2. Användning.....	11
3. Specifikationer .....	13
4. Rengöring, desinfektion och förvaring.....	14
4.1. Rengöring av kameramodul .....	14
4.2. Rengöring av huvudenheten .....	14
4.3. Desinfektion av kameramodul och Multiinstrumentets huvudenhet .....	14
4.4. Rengöring och desinfektion av den externa instrumentkanalen .....	15
4.5. Förvaring.....	15
5. Felsökning.....	16
6. Delar	
6.1. Huvudkomponenter .....	18
6.2. Delar .....	19
7. Underhåll och Kassering .....	20
7.1 Underhåll .....	20
7.2 Kassering.....	20
8. Begränsad garanti.....	21
9. Symbolförklaringar .....	22
10. Bilaga .....	25

## 1. Introduktion

### 1.1. Produktöversikt

Instrumentet är en handhållen medicinteknisk produkt för att dokumentera med bild/video vid ÖNH undersökning. Bilden visas direkt på en inbyggd skärm samt går att föra över till dator.

Instrumentet är förinställt för fokus, ljusstyrka och vitbalans. Det drivs av ett 18650-batteri för kontinuerlig användning i cirka 2 timmar.

### 1.2. Avsedd användning


Instrumentet används som ett hjälpmedel för att observera örats hälsotillstånd. Användningsområden inkluderar: inspektion av den yttre hörselgången och trumhinnan samt upptäckt av främmande kropp.

Enheten kan även kombineras med andra kameramoduler för att övervaka hälsotillståndet i näshåla och munhåla.


Användningsområden inkluderar:

- Näshåla: näsvestibul, nässkiljevägg, nedre näsmusslan och nedre näsgången, mellersta näsmusslan och mellersta näsgången.
- Munhåla: inspektion av gom, tunga och svalg.

## 1.3. Produktritning

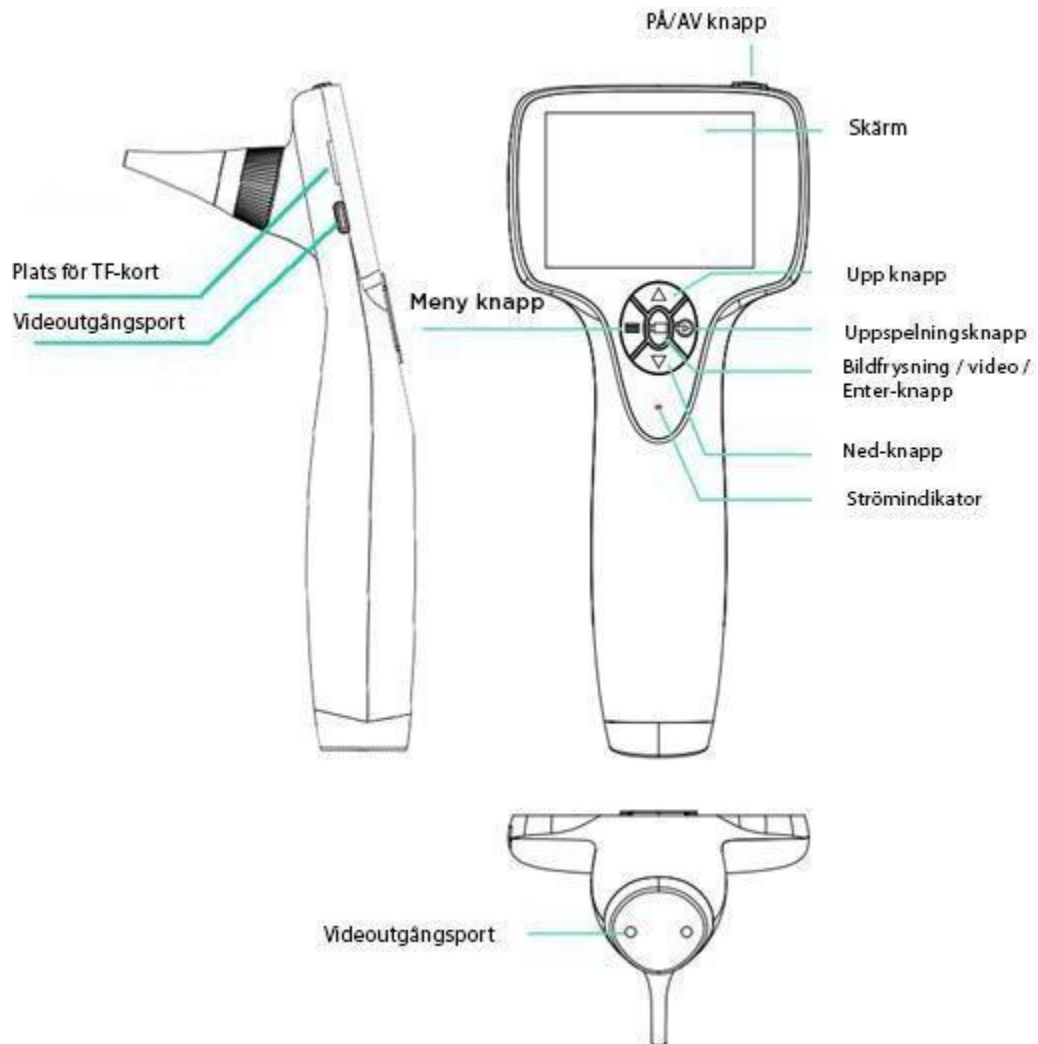

Modell: VOT-01

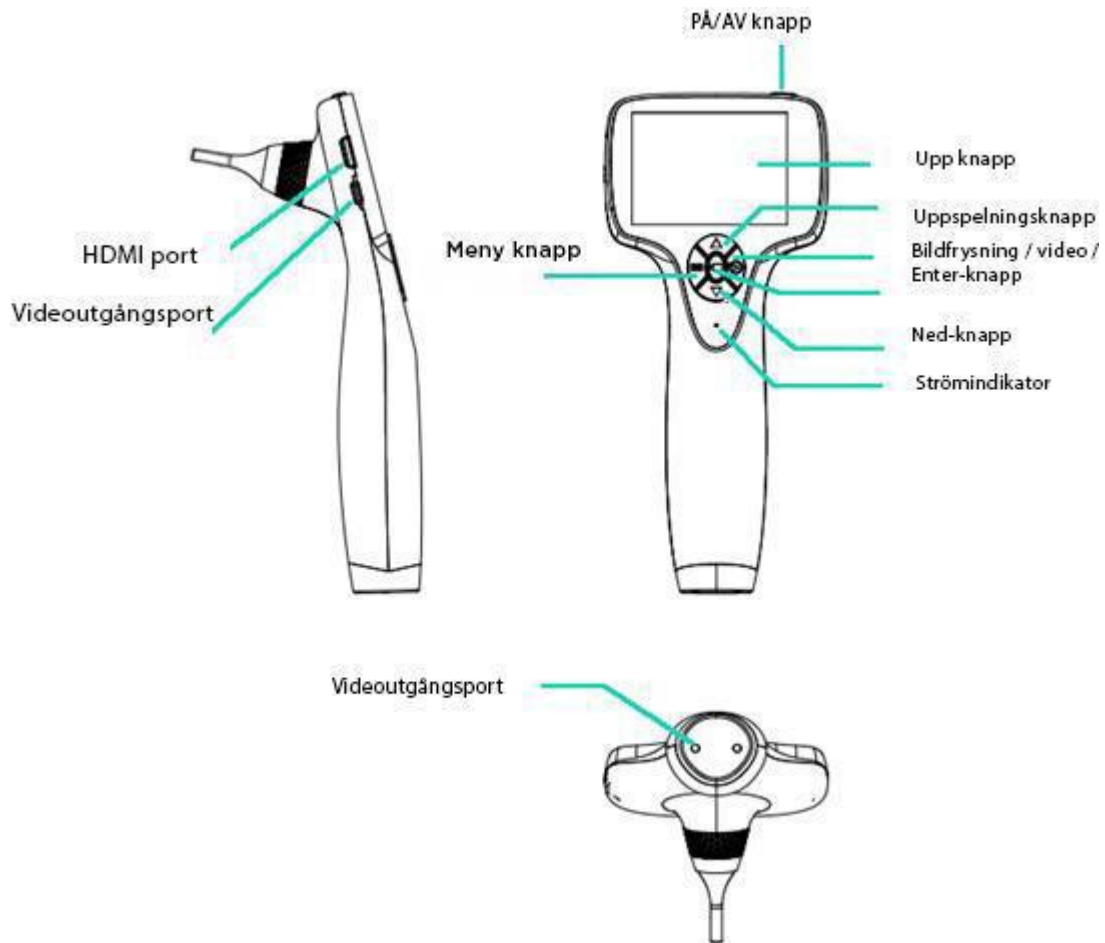

Modell: VOT-02

## 1.4. Försiktighetsåtgärder och varningar

### Försiktighetsåtgärder:

Instrumentet ska användas under övervakning av utbildad sjukvårdspersonal.



- **Använd inte denna enhet i närvaro av brandfarliga anestesimedel.**

- Följ lokala regler och föreskrifter för kassering eller återvinning av enheten och dess komponenter.
- Videoutgångskontakten (RCA-port) är avsedd för anslutning till enheter som uppfyller IEC 60601-1 eller andra relevanta IEC-standarder (till exempel IEC 60950).
- Blötlägg inte kameramodulerna i alkohol eller annan rengöringsvätska.
- Bärbara och mobila trådlösa kommunikationsenheter som sänder radiofrekvens (RF) kan påverka prestandan hos den medicinska elektriska enheten.
- Vissa patienter kan uppleva värme vid kameramodulen under diagnostik om enheten lämnas påslagen under längre tid. Operatören bör först informera patienten om detta möjliga obehag och vid behov ta bort enheten från patienten och stänga av den tills kameramodulen inte längre känns varm.
- Före varje användning ska kameramodulen kontrolleras för att säkerställa att det inte finns oavsiktliga ojämna ytor, vassa kanter eller utskjutande delar som kan utgöra en säkerhetsrisk.
- Den teknisk livslängd för produkten är fem år från tillverkningsdatumet (se etikett).

### WARNING:



- Ingen modifiering av denna utrustning är tillåten.
- Under extrema laborietestförhållanden vid 40 °C kan enheten uppnå en temperatur på högst 60 °C och dess hölje 49 °C om den är kontinuerligt påslagen i mer än 2 timmar.
- Kontrollera att strömkällans spänning är korrekt innan utrustningen ansluts till eluttaget.
- Om utrustningen inte används under en längre tid koppla bort den från strömkällan för att undvika skador orsakade av tillfälliga överspänningar

## 2. Användning

### 2.1. Installera instrumentet


1. Rikta in monteringsbasen och sätt in kameramodul.

2. Vrid medurs och dra åt.  
(Dra inte åt för hårt)

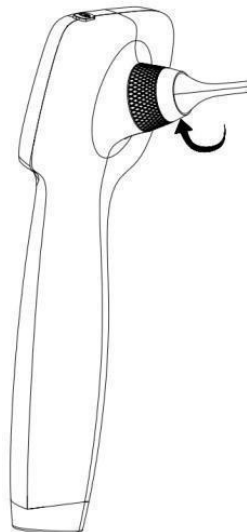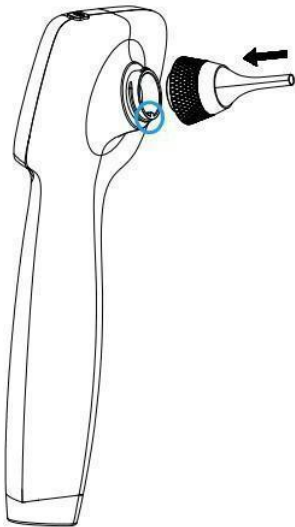


## 2.2. Användning

### Power ON/OFF

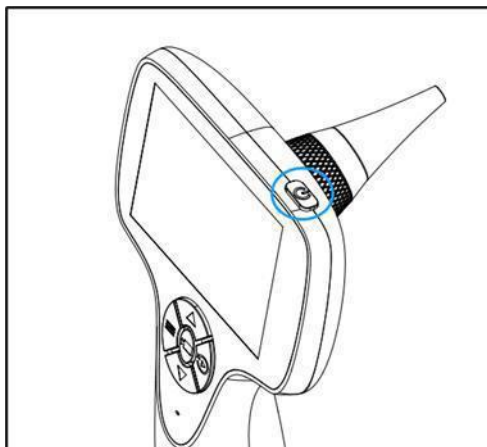

Tryck och håll in strömknappen i 2 sekunder för att slå på enheten.

### Batteristatus

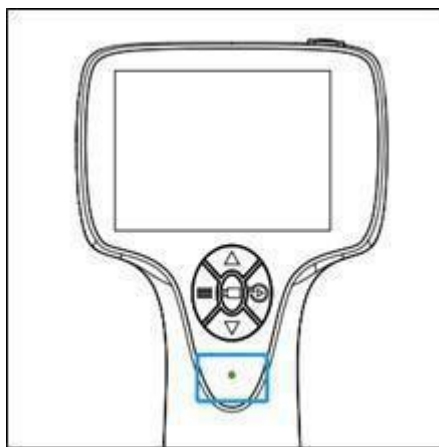

När enheten laddas kommer indikatorlampan att växla från grön

### Bildfrysning / video / Enter-knapp



När enheten är påslagen, tryck på bildfrysningknappen i mindre än 1 sekund för att frysa bilden, för att spara bilden håll in knappen tills det står "sparad bild". Tryck på samma knapp igen i mer än 3 sekunder för att spela in video.

Denna knapp kan även användas för att

### Uppspelningsknapp



bekräfta menyval. När enheten är påslagen tryck på Uppspelningsknappen för att förhandsgranska frysta Foton och videor.

# BESDATA

## Menyknapp



För att komma till meny tryck på den vänstra knappen som bilden illustrerar.


Det finns fyra funktioner i menyn: kameraläge, inspelningsläge, uppspelning och inställningar. Meny Inställningar innehåller fyra alternativ: datuminställning, tidsinställning, språkinställning och formatering av SD-kort.

## Navigering




När du går in på menysidan eller uppspelningssidan kan du trycka på uppknappen och nedknappen för att växla mellan sidorna.

## Laddning

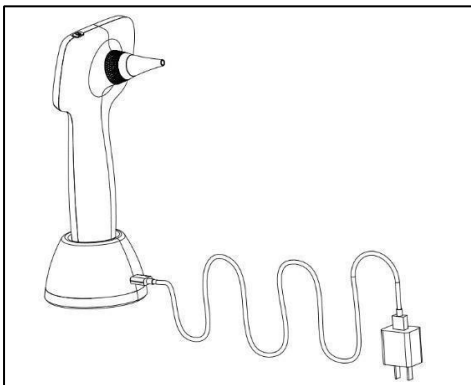

Anslut kabeln till laddstationen samt vägguttaget som bilden illustrerar.

## Dataöverföring och streaming

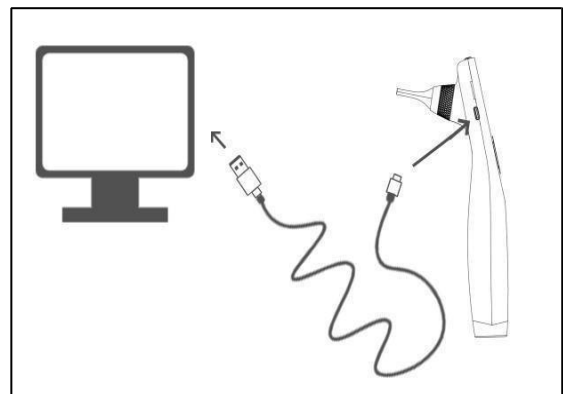

Dataöverföring: Stäng av instrumentet, sätt i usb-c sladden i instrumentet samt datorn, starta instrumentet, en symbol för överföring visas på enhetens skärm. Bilder och filmer finns nu tillgängliga på datorn via textutforskaren.

Streaming: Starta instrumentet, anslut USB-C till instrumentet samt datorn. Starta valfritt program för streaming på datorn, välj instrumentet som kameraenhet.

## 3. Specifikationer

Kameramodul	Specifikationer				
	Längd:(mm)	Arbetslängd(mm)	Max OD(mm)	Syndfält	Siktriktning (DOV)
308019	45	30	4.2	120°	0°
308020	110	80	4.2	120°	0°
308044	200	175	6.0	120°	70°

Item	Specifications	Specifications
Modell	VOT-01	VOT-02
Version		GEDOC Multiinstrument
Batterimodell	18650	18650
Laddningstid	≤2 timmar	≤2 timmar
Urladdningstid	≥2 timmar	≥2 timmar
Maximal kompatibilitet för SD-kort	32G	32G
Laddningsspecifikationer	5V/1A,5V/2A	5V/1A,5V/2A
Skärmupplösning	640*480	640*480

Instrument	Förvaringsförhållanden	Transportförhållanden	Driftförhållanden
Omgivningstemperatur	10°C to 40°C	-20°C to 50°C	10°C to 35°C
Relativ luftfuktighet	Minst 10 % RF, högst 85 % RF, icke-kondenserande	Minst 10 % RF, högst 95 % RF, inklusive kondensering	Minst 10 % RF, högst 85 % RF, icke-kondenserande
Atmosfärstryck	Minst 70 kPa, högst 106 kPa	Minst 70 kPa, högst 106 kPa	Minst 70 kPa, högst 106 kPa

## 4. Rengöring, desinfektion och förvaring

Före och efter användning ska multiinstrumentet och dess tillbehör rengöras och desinficeras enligt nedan.

### 4.1. Rengöring av kameramodul


**Syfte:** Avlägsna synlig smuts före desinfektion.

Steg 1: Förbered en luddfri engångsduk fuktad med vatten och vid behov mildt rengöringsmedel.

Steg 2: Rengör och torka av kameramodulens ytor noggrant.

Steg 3: Rengör kameranlinsen försiktigt. Var noga med att inte repa linsen eller använda slipande material.

**Observera:** Rengöring ska alltid föregå desinfektion.

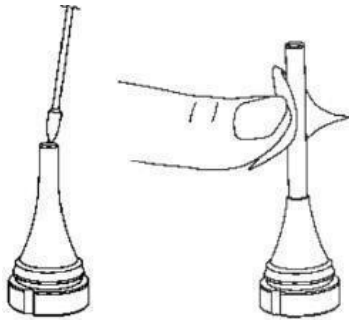

### 4.2. Rengöring av huvudenheten


Multiinstrumentets huvudenhet och skärm rengörs med en luddfri duk fuktad med vatten och mildt rengöringsmedel.

Säkerställ att vätska inte tränger in i enheten.

### 4.3. Desinfektion av kameramodul och Multiinstrumentets huvudenhet.

**VARNING:**

- Multiinstrument är inte vattentätt och får inte nedsänkas i vätska.

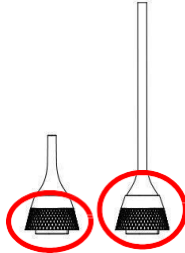

- Kameramodulen är inte vattentätt och får inte nedsänkas i vätska.

Tillämpliga och godkända desinfektionsmetoder:

- Etanolbaserat ytdesinfektionsmedel för medicinteknik.
- UV-desinfektion. Kameramodulerna är godkända att desinficera i UV-skåp. Följ UV-skåpets anvisning.

**Desinfektion med ytdesinfektionsmedel:**

- a) Desinficera kameramodulens ytor med duk och etanolbaserad ytdesinfektion för medicinteknisk produkt.
- b) Följ desinfektionsmedlets bruksanvisning avseende kontakttid.
- c) Låt ytan lufttorka.

## 4.4. Rengöring och desinfektion av den externa instrumentkanalen

Kameramodul med extern instrumentkanal säljs ej i Sverige.

## 4.5. Förvaring

1. Kameramodulen och huvudenheten ska placeras i förvaringsfacket i bärväskan.
2. De desinficerade instrumenten ska placeras rent och torrt.
3. Onödig exponering för extrema temperaturer och luftfuktighet ska undvikas.

## 5. Felsökning

### **Varför startar inte Instrumentet**

- Kontrollera att instrumentet har ström. Om det inte har ström, ladda det.
- Kontrollera om det är ett problem med SD-minneskortet. Du kan ta ut SD-minneskortet och sätta i det igen. (gäller ej VOT 2 där SD kortet är inbyggt/ej kan avlägsnas).
- Kontrollera om strömknappen är skadad; tryck på strömknappen för att se om den reagerar.
- Om enheten fortfarande inte startar efter att du upprepat ovanstående steg, kontakta din distributör för teknisk support.

### **Efter att enheten har startat lyser strömindikatorlampan, men ingen bild visas eller så är bilden suddig och instabil.**

- Kontrollera om LED-lampan längst fram på kameramodulen är tänd.
- Kontrollera att kameramodulen är korrekt monterad.
- Kontrollera att kameramodulen och monteringsbasen är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera om det sitter något främmande föremål på metallkontakten och rengör ytan med en Etanolbaserad ytdesinfektion avsedd för medicinteknik.
- Om bilden fortfarande inte visas korrekt efter att du utfört steg 1–4 ovan, kontakta distributör för teknisk support.

## **Bilden är påslagen med bildvisning men jag kan inte frysa bilden.**

- Starta om enheten och prova frysfunktionen igen.
- Kontrollera att knappen kan tryckas ned utan svårighet och upprepa minst 10 gånger.
- Huvudenheten kan vara defekt om frysfunktionen fortfarande inte fungerar efter att ovanstående steg upprepats flera gånger. Kontakta din distributör för teknisk support.

## **Enheten är ansluten till en stor skärm men ingen bild visas på skärmen.**


- Kontrollera anslutningen av videokabeln och säkerställ att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att strömmen är påslagen.

## 6. Delar

### 6.1. Huvudkomponenter

nr	Namn	Antal	Beskrivning	Notering
1	Huvudenhet	1	Handhållet video och bild instrument	
2	Laddstation	1	Ladda instrumentet	
3	Adapter	1	AC/DC adapter EU kontakt.	
4	Videoutgångskabel	1	Överför data till enheten	
5	Manual	1	Bruksanvisning	
6	Kameramodul	1	308019	ÖNH
7	Kameramodul	1	308020	
8	Kameramodul	1	308044	

## 6.2. Delar

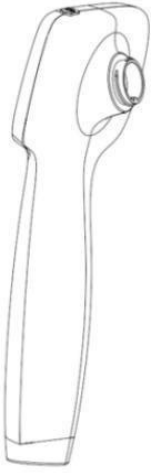


**1**



**2**



**3**

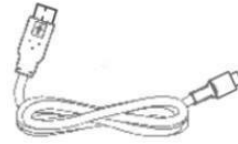


**4**



**5**



**6**

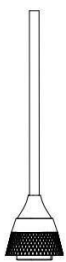

**7**



**8**

## 7. Underhåll och Kassering

### 7.1 Underhåll

Inget planerat underhåll krävs under Instrumentets livslängd.

Utför en enhetskontroll minst en gång per år, vilken omfattar följande kontroller:

- Kontrollera Instrumentet för synliga tecken på yttre skador.
- Kontrollera att nätadaptern och laddningskabeln fungerar korrekt (laddning av batteriet).
- Säkerställ att Instrumentet fungerar korrekt enligt informationen i denna manual.

Använd inte Instrumentet om du upptäcker synliga skador eller felaktigt skick.

Förvara Instrumentet under följande förhållanden:

- Förvara i välventilerade utrymmen och utsätt inte för aggressiva ämnen.
- Förvara torrt, dammfritt och skyddat från solljus.

### 7.2 Kassering



Enheten och dess komponenter får inte kasseras tillsammans med vanligt kommersiellt eller hushållsavfall. Lämna produkten till en separat insamlingsplats för återvinning av elektronisk utrustning i enlighet med lokala föreskrifter. Alternativt kan du skicka enheten till distributör. för korrekt kassering. Vid retur av Instrumentet måste enheten vara dokumenterat desinficerad.

## 8. Begränsad garanti

Varje BESDATA® Instrument levereras med garanti, räknat från inköpsdatum, som täcker reparation och/eller vid behov utbyte av produktfel som beror på material- eller tillverkningsdefekter. Garantitiden är normalt ett år men kan i enskilda fall vid upphandling justeras. Inom ramen för garantin ska defekta produkter repareras eller ersättas av tillverkaren eller av auktoriserade tekniska servicegrupper, efter deras val och i den utsträckning lagen medger.

Garantin är inte överlåtbar. Skador som beror på oaktsamhet, olycka, felanvändning, ändring eller reparationer som inte utförts av tillverkaren eller auktoriserade tekniska servicegrupper omfattas inte av garantin. Inom garantins omfattning täcks inte leveranskostnader för försändelse till distributör eller direktbutik.

Tillverkare:

SHENZHEN BESDATA TECHNOLOGY CO.,LTD.













Distributör:

GEDOC AB












BESDATA® är ett registrerat varumärke som tillhör SHENZHEN BESDATA TECHNOLOGY CO.,LTD.


Monterad i Kina

## 9. Symbolförklaringar

Symbol	Beskrivning
	Sista förbrukningsdag
	Varning
	Se bruksanvisning
	Använd inte om förpackningen är skadad-konsultera bruksanvisningen
	Tillverkningsdatum
	Typ BF tillämpad del
	Tillverkare
	Undvik solljus
	Förvaras torrt
	Staplingsbegränsning: max 5
	Ömtåligt, hanteras varsamt
	Denna sida upp
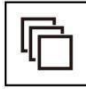
# BESDATA

	Medicinteknisk produkt
	Unik produktidentifierare (UDI)
	Serienummer
	Auktoriserad representant inom Europeiska unionen
	Endast Receptbelagd (Avser endast USA)
	Importör
	Elektrisk/elektronisk utrustning – får ej kasseras med hushållsavfall
	Överensstämmer med förordningen (EU)2017/745
	Antal
	Temperaturområde
	Begränsning av luftfuktighet

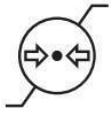

Begränsning av atmosfärstryck

## 10. Bilaga

Tabell 1

Vägledning och tillverkarens deklARATION – elektromagnetiska emissioner.

Instrumentet är avsett att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan.

Kunden eller användaren av enheten ska säkerställa att den används i en sådan miljö.

<b>Emissionstest</b>	<b>Överensstämmelse</b>	<b>Elektromagnetisk miljö – vägledning</b>
RF-emissioner CISPR11	Grupp 1	Enheten använder RF-energi endast för sin interna funktion. Därför är dess RF-emissioner mycket låga och orsakar sannolikt ingen störning i närliggande elektronisk utrustning.
RF-emissioner CISPR11	Klass B	Enheten är lämplig för användning i alla miljöer, inklusive hemmiljöer och de som är direkt anslutna till det offentliga lågspänningsnätet som försörjer byggnader som används för bostadsändamål.
Harmoniska emissioner IEC 61000-3-2	Ej tillämpligt	
Spänningsvariationer / flimmeremissioner IEC 61000-3-3	Ej tillämpligt	

Tabell 2

Vägledning och tillverkarens deklARATION – elektromagnetisk immunitet.

Instrumentet är avsett att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan.

Kunden eller användaren av enheten ska säkerställa att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest	IEC 60601 testnivå	Överensstäm- elsenivå	Elektromagnetisk miljö – vägledning
Elektrostatiska urladdningar (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV kontakt ± 8 kV luft	± 6 kV kontakt ± 8 kV luft	Golv ska vara av trä, betong eller keramiska plattor. Om golvet är täckt med syntetiskt material bör den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.
Snabba elektriska transienter/burstar IEC 61000-4-4	± 2 kV för kraftledningar ± 1 kV för in-/utgångsledningar	Ej tillämpligt	
Överspänning (Surge) IEC 61000-4-5	± 1 kV ledning till ledning ± 2 kV ledning till jord	Ej tillämpligt	
Spänningsdippar, korta avbrott och variationer på kraftförsörjningsledningar IEC 61000-4-11	< 5 % UT (>95 % dipp i UT) i 0,5 cykel 40 % UT (60 % dipp i UT) i 5 cykler 70 % UT (30 % dipp i UT) i 25 cykler < 5 % UT (>95 % dipp i UT) i 5 s	Ej tillämpligt	
Lågfrekventa magnetfält IEC 61000-4-8	3 A/m	0,3 A/m	Om bildstörning uppstår kan det vara nödvändigt att placera bildförstärkaren längre bort från källor till lågfrekventa magnetfält eller att installera magnetisk avskärmning. Det lågfrekventa magnetfältet bör mätas på den aktuella platsen för att säkerställa att fältnivån är tillräckligt låg.

**Obs!** UT är nätspänningen (växelström) före tillämpning av testnivån.

Tabell 3

Vägledning och tillverkarens deklARATION – elektromagnetisk immunitet.

Instrumentet är avsett att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan.

Kunden eller användaren av enheten ska säkerställa att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest	IEC 60601 testnivå	Överensstäm melsenivå	Elektromagnetisk miljö – vägledning
Ledningsbunden RF IEC 61000-4-66	3 Vrms 150 kHz till 80 MHz	Ej tillämpligt	<p>Portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning bör inte placeras närmare någon del av enheten, inklusive kablar, än det rekommenderade separationsavståndet som beräknas utifrån ekvationen som gäller för sändarens frekvens.</p> <p>Rekommenderat separationsavstånd: <math>d = 1,2\sqrt{P}</math>  <math>d = 1,2\sqrt{P}</math> för 80 MHz till 800 MHz <math>d = 2,3\sqrt{P}</math> för 800 MHz till 2,5 GHz där P är sändarens maximala uteffekt i watt (W) enligt tillverkaren och d är det rekommenderade separationsavståndet i meter (m). Fältstyrkan från fasta RF-sändare, som fastställs genom en elektromagnetisk fältmätning, bör vara lägre än överensstäm melsenivån i respektive frekvensområde. Störningar kan förekomma i närheten av utrustning som är märkt med följande symbol:</p>
Utsänd RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz till 2,5 GHz	3 V/m	

Obs 1: Vid 80 Hz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.

Obs 2: Dessa riktlinjer gäller inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.

En fältstyrka från sändare, t.ex. basstationer för mobiltelefoner (GSM), portabla och mobila radioapparater, amatörradio, AM- och FM-radio samt TV-sändningar, kan inte teoretiskt förutsägas med säkerhet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön på grund av fasta RF-sändare bör en mätning av elektromagnetiska fältet övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där enheten används överstiger tillämplig överensstäm melsenivå, ska enheten observeras för att säkerställa normal funktion. Om onormal funktion observeras kan ytterligare åtgärder behövas, såsom omorientering eller flytt av enheten.

Vid frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkan vara lägre än 3 V/m.

Tabell 4

Rekommenderade separationsavstånd mellan portabel och mobil

RF-kommunikationsutrustning och BESDATA® Instrument

Enheten är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där utsända

RF-störningar är kontrollerade. Användaren av enheten kan bidra till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att hålla ett minsta avstånd mellan portabel och

mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och enheten, enligt

rekommendationerna nedan baserat på kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.

Märkt maximal uteffekt för sändare (W)	Separationsavstånd enligt sändarens frekvens (m)		
	150 kHz to 80 MHz d=1,2VP	150 kHz to 80 MHz d=1,2VP	150 kHz to 80 MHz d=1,2VP
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

**Obs 1:** Vid 80 Hz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.

**Obs 2:** Dessa riktlinjer gäller inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.

**Obs 1:** Vid 80 Hz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.

**Obs 2:** Dessa riktlinjer gäller inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.



**Shenzhen Besdata Technology Co., Ltd.**

Add.: 503, Building #2, Xinnantian Industrial Park, No. 3179, Danzi Avenue,  
Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen City, Guangdong  
Province, China

Tel: +86-755-84416070

Fax: +86-755-23039200

E-post: [support@besdatatech.com](mailto:support@besdatatech.com)



**SUNGO Europe B.V.**

Add.: Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909 VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

Contact: Yana Zhang (Mrs.)

Tel /Fax: +31(0)10 3034500

Email: [ec.rep@sungoglobal.com](mailto:ec.rep@sungoglobal.com)/[yan.zhang@sungoglobal.com](mailto:yan.zhang@sungoglobal.com)



**EU Importer**

**RIOMAVIX S.L.**

Add.: CALLE DE ALMANSA 55,1D,28039 MADRID SPAI

NE-post: [celiaddiego@riomavix.com](mailto:celiaddiego@riomavix.com)



**Gedoc AB**

Risängsgatan 15, 602 28 Norrköping

Tel: 08-502 462 80

E-post: [information@gedoc.se](mailto:information@gedoc.se)

BESDATA-QR-4.2.3-02-07-BD011-02 Rev. A/1 | 10.03.2026

**BESDATA**