

Snabbguide

DE609 ProctoDoc

1. Förbered enheten

1. Säkerställ att kamera, kabel och adapter är rena och oskadade.
2. Rengör produkten med mild tvål och ren trasa.
3. Desinficera produkten med ytdesinfektion, följ anvisningarna på desinfektionsmedlet.



2. Anslut enheten

1. Anslut kamerans USB-kabel till dator
2. Starta datorn och den mjukvara du avser spara bilder /video genom (Journalssystem, digital vårdplattform eller på datorns hårddisk).



3. Undersökning

1. För in Cetro engångsrektoskop eller engångsproktoskop enligt rutin.
2. Avlägsna guidare/obturator.
2. Fäst kamerans adapter mot engångsproktoskopet.
2. Följ bild i realtid på skärmen.
2. Dokumentera bild/video enligt lokal rutin, notera att i vissa mjukvaror tas bild genom mjukvaran och inte genom produktens "snabbknapp" för bild.



4. Efter användning

1. Avlägsna kameran från engångsinstrumentet.
2. Kassera engångsinstrument enligt lokala rutiner.
3. Rengör och desinfektera kamera och adapter enligt IFU.



4. Viktigt att komma ihåg

1. Kameran saknar intern lagring - dator krävs alltid
3. Kameran får inte föras in i patienten
4. Produkten är inte steril

Support

+46 8 502 462 80
information@gedoc.se