

# Snabbguide

## 1. Starta enheten

För att starta enheten, håll in knappen 2 sekunder.



## 2. Bild guide

1. För att ta en bild, tryck en gång på mitten knappen.
2. För att spara bilden håll ned mitten knappen tills "sparar fil" kommer upp.
3. Tryck en gång till för att ta en ny bild.

Kontrollera så att symbolen visas upp till vänster.



## 3. Video guide

1. För att ta ett filmklipp, håll ner mitten knappen till den röda lampan längst upp åt vänster på skärmen börjar blinka rött.
2. Tryck en gång till på mitten knappen för att avsluta inspelningen.
3. Tryck på menyknappen för att navigera dig till sparade filmer.



Kontrollera så att symbolen visas upp till höger.

## 4. Rengöring

Rengör alltid instrumentet och dess tillbehör efter användning. Desinficera därefter i UV-skåp eller med etanolbaserad ytdesinfektion.

### Support

+46 8 502 462 80  
information@gedoc.se



## 5. Radera Bilder/video

### PÅ ENHETEN

1. **ENHET**  
Tryck på Menyknappen och välj **bild/videouppspelning**.
2. Gå vidare till **BILD ELLER VIDEO** och tryck på mittenknappen
3. Välj **RADERA AKTUELLT** eller **RADERA ALLA**  
*OBS: notera att du måste göra detta separat för bild och video.*

Kontakta vår support om ni har några övriga frågor.



## 6. Radera Bilder/video

### PÅ DATOR

1. **DATOR**  
Koppla in ditt Multiinstrument till datorn via USB. *(OBS: stäng först av enheten och koppla sedan in kabeln. Starta enheten).*
2. **Öppna utforskaren** till datorn och lokalisera din enheten (den här datorn).
3. För att ta bort allt - ta bort **mapp för PHOTO och VIDEO**.
4. För att radera enstaka bilder - markera den bilden du vill ta bort och tryck **radera** på tangentbordet.

Kontakta vår support om ni har några övriga frågor.



### Support

+46 8 502 462 80  
information@gedoc.se

