


# 5 minguide

## 1. Starta enheten

1. För att starta enheten, håll in knappen 2 sekunder.
2. Kontrollera så att rätt läge är aktiverat. Det ser du på symbolen till vänster.

*När man först startar upp enheten så är fotoläge standard.*

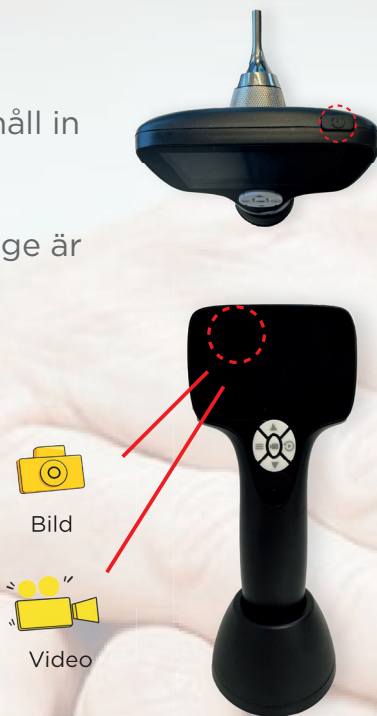

## 2. Ta en bild

1. Tryck 1 gång på mitten knappen för att ta en bild.



2. Du ser en vit handsymbol ner till vänster när bilden är tagen.



3. Spara bild genom att hålla ned mittenknappen tills den blå rutan visas med "sparar fil".



4. Tryck sedan en gång till på mittenknappen för att komma tillbaka till att ta en ny bild.




### 3. Spela in en video


1. Håll ner mittenknappen för att spela in, tryck en gång till för att avsluta inspelningen



2. För att se sparade inspelningar - tryck på vänsterknappen och navigera dig till bild och videoinspelningar

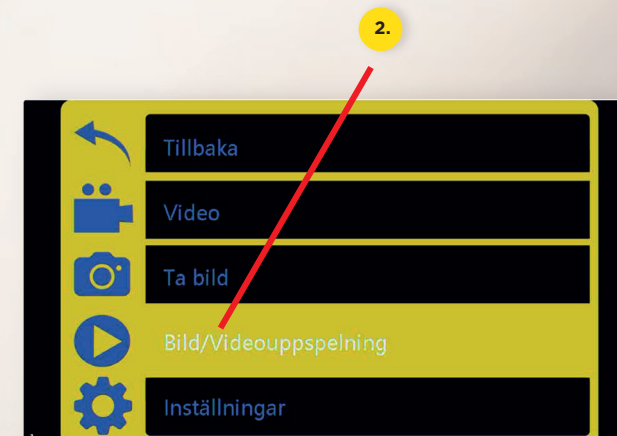

3. För att växla läge bild/video - gå in till menyn till vänster och välj "video" eller "ta bild"

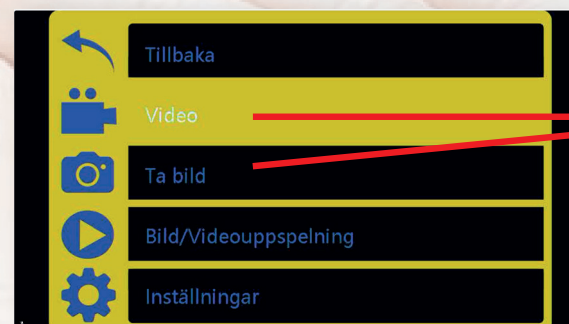


*Video sparas automatiskt på enheten efter inspelning!*

*Tips: man kan också hålla in mittenknappen för att växla från bildläge till filmäge.*

## 4. Överföring till dator

1. Stäng av enheten.
2. Koppla in den medföljande USB-kabeln mellan enheten och datorn.
3. Starta enheten.
4. Nu visas en symbol på enheten som bekräftar att enheten är kopplad korrekt.
5. Enheten visas som en extern lagringsenhet.

*Klart för överföring av bild och video.*

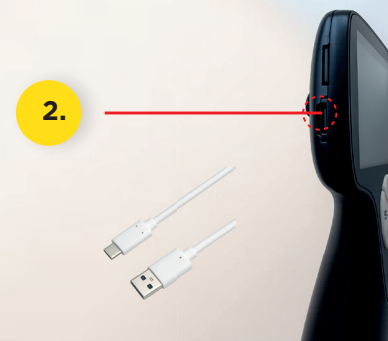

## 5. Rengöring

1. Rengör alltid instrumentet och dess tillbehör efter användning. Desinficera därefter i UV-skåp eller med etanolbaserad ytdesinfektion.

Vid undersökning kan hygienöverdrag användas på kameramodulen – följ lokala rutiner och anvisningar. Hygienöverdrag ersätter inte kravet på rengöring och desinfektion mellan patienter. Läs alltid bruksanvisningen före användning.

### Support

+46 10 264 53 30  
[information@gedoc.se](mailto:information@gedoc.se)